

Hydrafacial®

تنظيف نظام Syndeo®



نهاية كل علاج




تأكد من تثبيت غطاء
التنظيف على قطعة
اليدين كخطوة أولى



اشطف بالماء




افرغ حاوية النفايات

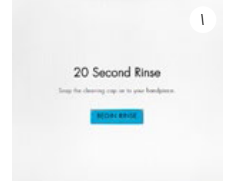

قم بشطف النظام
لمدة ٢٠ ثانية

نهاية كل يوم

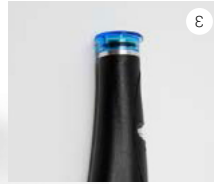


تأكد من أن غطاء
التنظيف مثبت على
قطعة اليدين كخطوة أولى



اتركها لتجف في
الهواء



اغسل حاوية النفايات
بالصابون والماء

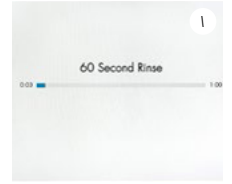

قم بشطف النظام
لمدة ٦٠ ثانية

تنظيف قطعة اليد - أسبوعياً



أدخل فرشاة التنظيف في
فتحة الشفط (الصغيرة)
على واجهة قطعة اليد
ادفع الفرشاة إلى الداخل
والخارج بالكامل مع
تدويرها ثلاث مرات
كرر ذلك في
الموصل الأزرق





افصل قطعة اليد عن
جميع الأنابيب عن طريق
لف المقابض برفق
عكس اتجاه
عقارب الساعة




افتح صمام التحكم
إلى جهة +




نظف قطعة اليد، و غرغ
الأنابيب، و إلرأس
المصنوع من الألمنيوم
بمسحة مطهرة قاتلة
للجراثيم

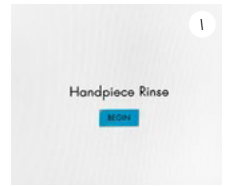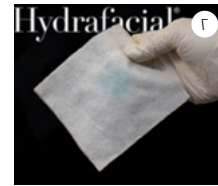

في شاشة القائمة، اختر
قطعة اليد اشطف من
قائمة "شطف النظام"

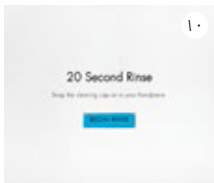

قم بشطف النظام
لمدة ٢٠ ثانية

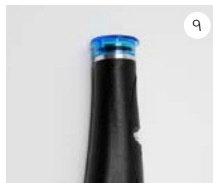

ثبت غطاء التنظيف



أعد توصيل الأنابيب




قم بإزالة غطاء التنظيف و انفخ الهواء في الأنبوب الأزرق الراجع مرتين

Hydrafacial®

تنظيف نظام Syndeo®

تنظيف الموزع

بعد كل 0 • علاجاً أو كل ٧ أيام، أيهما يأتي أولاً

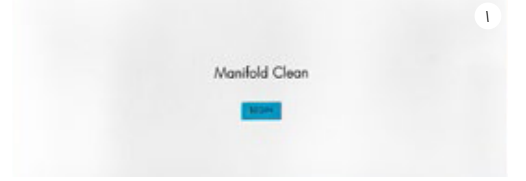

قم بإزالة المحاليل من الموزع

على الشاشة، اختر القائمة ثم اختر شطف الموزع من قائمة نظام الشطف



أعد توصيل جميع المحاليل ونظف حاوية التفايات



عند اكتمال الشطف، افصل زجاجة Rinseaway الخاصة بالجهاز من الفتحة ١، ثم قم بتوصيلها بالفتحة ٢ اختر "متابعة"




عند الانتهاء من الشطف، افصل زجاجة شطف الجهاز من الفتحة ١، ثم قم بتوصيلها بالفتحة ٢ اضغط على متابعة




أدخل زجاجة Rinseaway الخاصة بالجهاز في الفتحة ١. ثم اختر "بدء الشطف"

شاشة اللمس الخاصة بالنظام

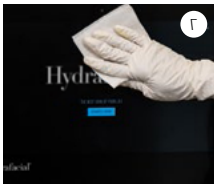

استخدم منظف زجاج وقطعة قماش أو منشفة من الألياف الدقيقة لتنظيف شاشة لمس النظام رشح المنظف على القماش، ل ترشحه مباشرة على الشاشة

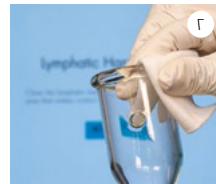

نظف قطع اليد الخاصة بالمعالج اللمفاوي بمحلول قاتل للجراثيم على أي منطقة تالمتس الجلد



المعالج اللمفاوي



للتنظيف: امسح بلطف باستخدام منشفة ناعمة مبللة قليلاً، ثم جفف بمنشفة ناعمة

لتعقيم الجهاز: افصل الجهاز عن مصدر الطاقة امسح سطح الجهاز بمسحة معقمة معتمدة لمدة لا تقل عن ٣٠ ثانية

المطهرات المعتمدة هي: مناديل CaviWipes

