


Syndeo بروتوكول تنظيف النظام



الشطف الإلزامي في نهاية المعالجة




أفرغ وعاء الأوساخ
واشطفه وجففه

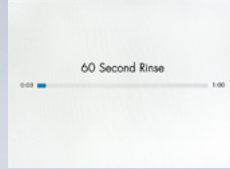

قم بإجراء شطف لمدة ٦٠
ثاني



ضع الغطاء وقم بفتح
الصمام بالكامل +

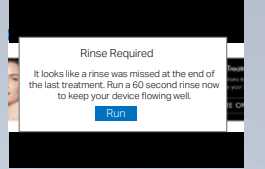


تنبيه الشطف في
نهاية العلاج

نهاية كل يوم




أفرغ، اشطف وجفف

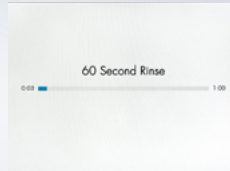

قم بالشطف




ضع الغطاء وافتح
الصمام بالكامل +

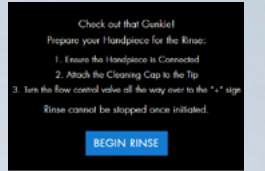

تنبيه الشطف

تنظيف المقبض - أسبوعيًا

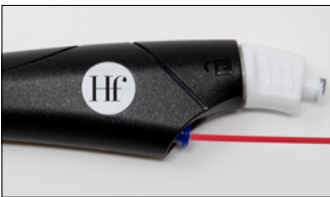

انفخ الهواء في خط الإرجاع
الأزرق مرتين.




أزل غطاء التنظيف، ثم أدخل
فرشاة التنظيف في الفتحة
المفرغة (الأصغر) الموجودة
على واجهة المقبض.
ادفع الفرشاة للداخل وللخارج
بالكامل مع تدويرها ثلاث مرات.
كرر العملية في الموصل الأزرق.



افصل المقبض عن جميع
الأنابيب عن طريق لف
المقابض برفق عكس اتجاه
عقارب الساعة.



افتح صمام التحكم إلى+.

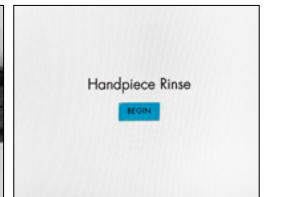

"في شاشة القائمة،
حدد "شطف المقبض"
من قائمة "عمليات
شطف النظام.



قم بشطف النظام لمدة ٦٠ ثانية.



ضع غطاء التنظيف.



أعد توصيل الأنابيب.



نظف المقبض الخارجي والرأس المصنوع من
الألومنيوم باستخدام منديل مطهر.




التنظيف الإلزامي للمشعب كل ٧ أيام بدءًا من أول دورة معالجة منذ آخر عملية تنظيف للمشعب.



ضع منشفة أسفل أنابيب الفصل لامتصاص السائل.




أزل الفصل من المشعب.

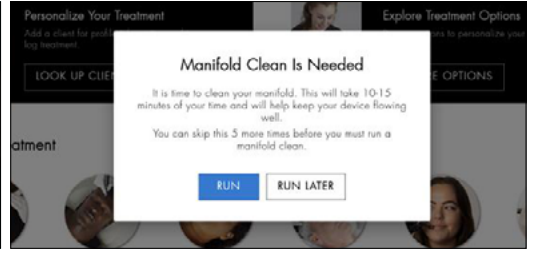


على الشاشة، حدد "القائمة"، ثم حدد "شطف المشعب"
من قائمة "عمليات شطف النظام."




تأكد من توصيل المقبض. قم بتثبيت غطاء التنظيف على الطرف.
أدر صمام التحكم في التدفق بالكامل إلى علامة "+".

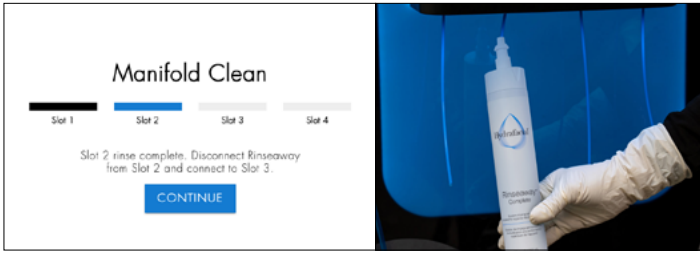

"عند اكتمال الشطف، افصل زجاجة شطف الجهاز من الفتحة ١
وقم بتوصيلها بالفتحة ٢. حدد "متابعة".

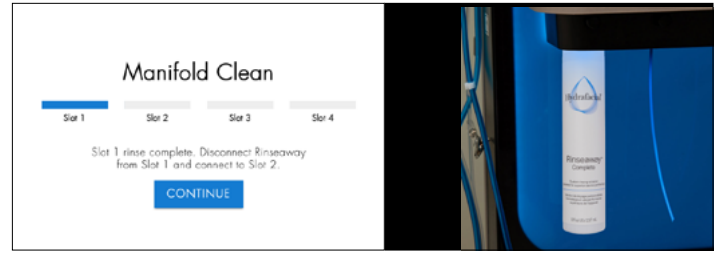


"أدخل زجاجة شطف الجهاز في الفتحة ١. حدد "بدء الشطف."

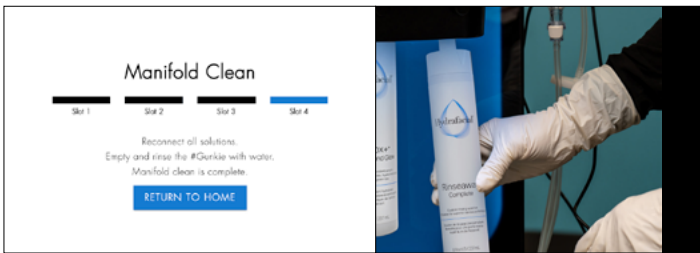

تأكد من الضغط على
"العودة إلى الصفحة الرئيسية"
بعد الانتهاء من الفتحة ٤.

"عند اكتمال الشطف، افصل زجاجة
شطف الجهاز من الفتحة ٣ وقم
بتوصيلها بالفتحة ٤. حدد "متابعة".

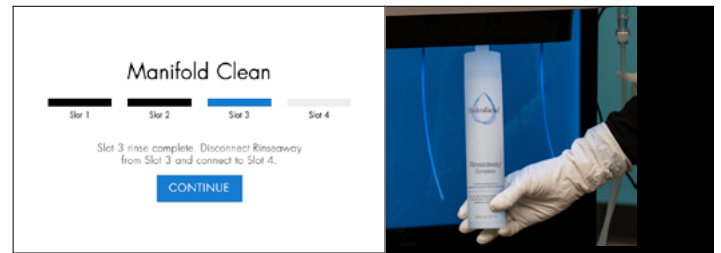


"عند اكتمال عملية الشطف، افصل زجاجة شطف الجهاز من الفتحة ٢
وقم بتوصيلها بالفتحة ٣. حدد "متابعة".



أعد زجاجات السبروم المتبقية إلى
مكانها ونظف وعاء عينة.


خيارات تخطي الشطف في حالات الطوارئ

قد يكون تخطي عمليات الشطف ضروريًا في بعض الأحيان في حالات الطوارئ، ومع ذلك، سيعمل نظامك بأفضل أداء عند إجراء جميع عمليات الشطف.

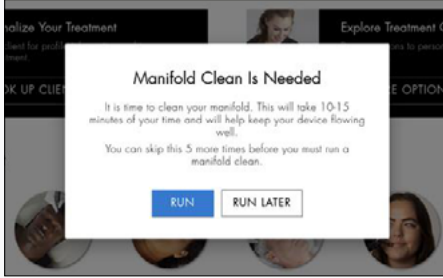


تنظيف المشعب

يمكن تخطيه حتى 0 مرات قبل أن يصبح ضروريًا.

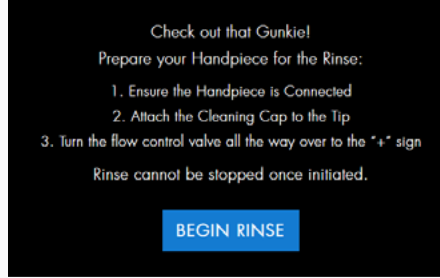

شطف نهاية العلاج

يمكن تخطيه حتى 0 مرات في ٣٠ يومًا.

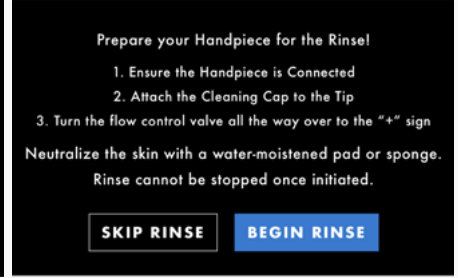


الشطف أثناء العلاج

يمكن تخطيه.

ملاحظة: عمليات الشطف ضرورية لمساعدة نظامك على الاستمرار في العمل بأفضل أداء. بمجرد بلوغ الحد الأقصى المسموح به لعدد مرات تخطي لشطف، لن يتمكن نظامك من إجراء المعالجات.

اجهزة العالج بالضوء

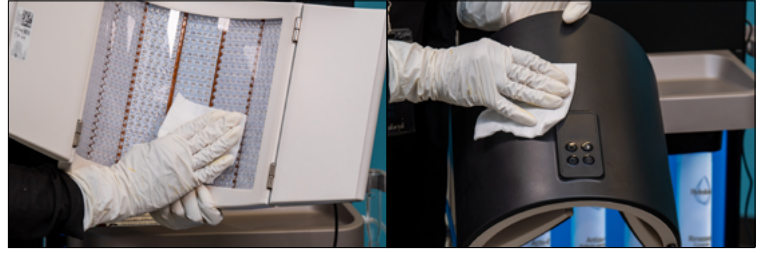


للتنظيف: افصل الجهاز وامسحه برفق بمنشفة ناعمة مبللة قليلاً، ثم جففه بمنشفة ناعمة.

للتطهير: افصل الجهاز عن مصدر الطاقة. امسح سطح الجهاز بمناديل المطهرة لمدة ٣٠ ثانية على الأقل Caviwipe.

مناديل CaviWipes المطهرات المعتمدة هي.


شاشة اللمس الخاصة بالنظام

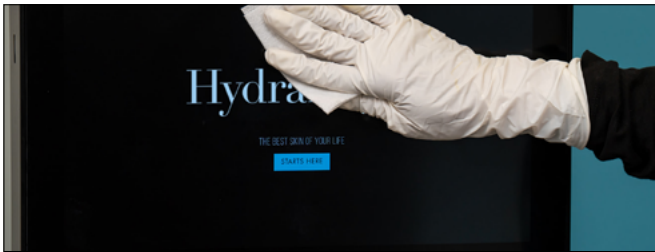

استخدم منشفة زجاج معتدل وقطعة قماش من الألياف الدقيقة أو منشفة لتنظيف شاشة اللمس الخاصة بالنظام. رش المنشفة على قطعة القماش، وليس مباشرة على الشاشة.

امسح الجهاز والشاشة بقطعة قماش من الألياف الدقيقة بانتظام لمنع تراكم الغبار والتوساخ والشوائب.

العلاج اللمفاوي

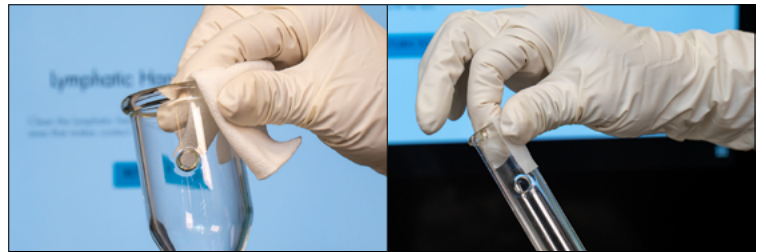

قم بتنظيف رؤوس العلاج اللمفاوي بمحلول مبيد للجراثيم على أي منطقة تتلامس مع الجلد.